



НЕЙРО ЧАТ



Настройка программного  
обеспечения АПК «НейроЧат»

# Варианты подключения оборудования

Для работы НейроЧат требуется устойчивое Интернет-соединение, при этом **должен быть выделен отдельный Wi-Fi канал для соединения компьютера с нейрогарнитурой.**

Возможны два варианта подключения:



**Подключение к Интернет через Wi-Fi**


Для работы требуется **2 модуля Wi-Fi**: один для соединения с нейрогартнитурой, второй – для соединения с сетью Интернет.



**Подключение к Интернет через кабель**

Для работы требуется **модуль Wi-Fi** (для соединения с нейрогарнитурой) и **сетевая карта** для проводного подключения к сети Интернет.



# Программное обеспечение

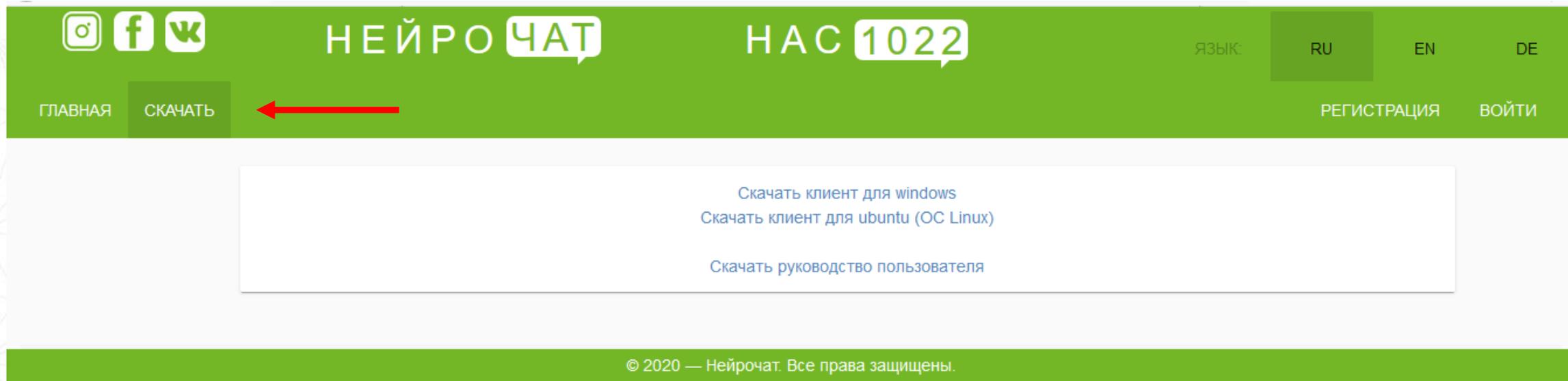

## Скачайте программное обеспечение и установите его на компьютер:

- Зайдите на сайт <https://srv.neurochat.ru/>, перейдите во вкладку «СКАЧАТЬ».
- Скачайте ПО для вашей операционной системы. Установите, следуя инструкции (программа Neurochat).

# Программное обеспечение

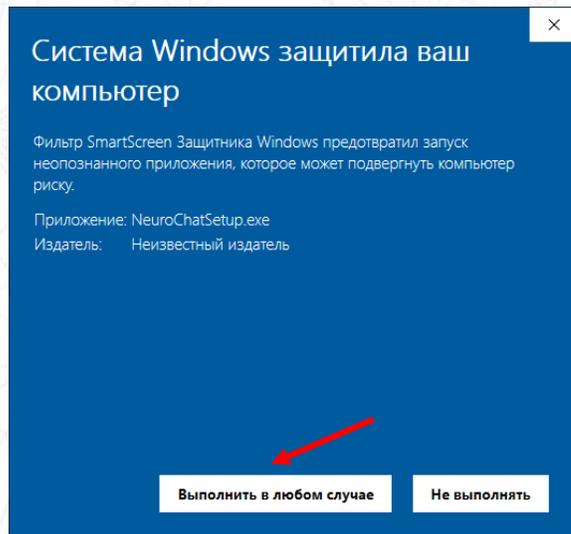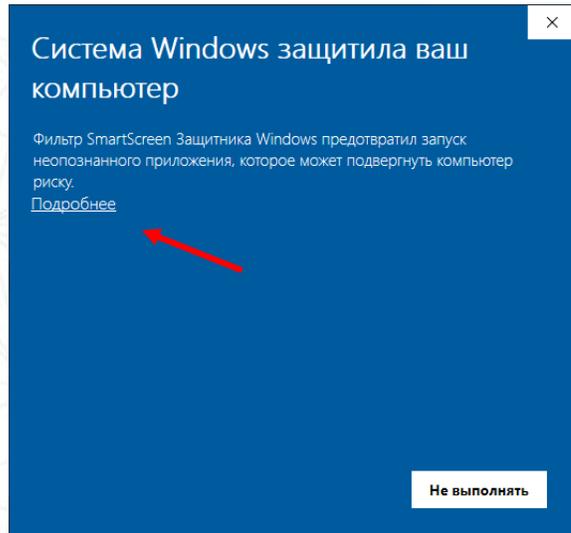

## Установка программного обеспечения

- Установите программу на компьютер, следуя подсказкам автоматического установщика.
- В некоторых случаях Windows может запросить разрешение на установку программы. Необходимо разрешить данную установку.


# Настройка сетевого окружения ПК перед подключением НейроЧат

**Перед первым использованием необходимо настроить IP-адрес для подключения нейрогарнитуры:**



**ВАЖНО:** без настройки IP-адреса и маски подсети гарнитура не подключится к программе!

- В Windows откройте: Панель управления – сеть и интернет – центр управления сетями и общим доступом – изменения параметров адаптера – адаптер – свойства – IPv4 – свойства – настройка

- В открывшемся окне пропишите следующие параметры:  
IP-адрес: 192.168.127.126,  
Маска подсети: 255.255.255.252

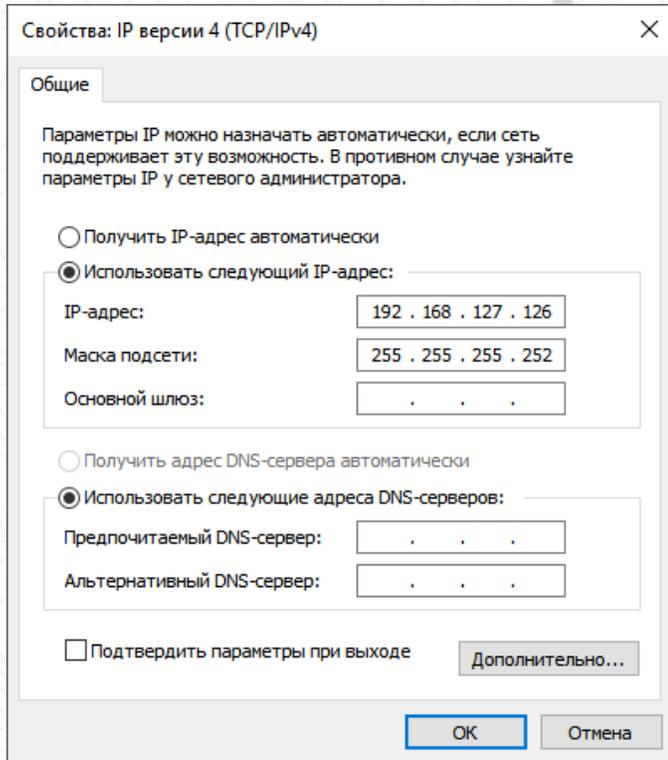

# Основные настройки программы Neurochat

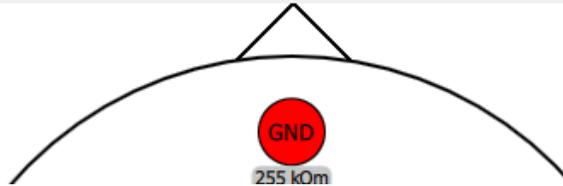
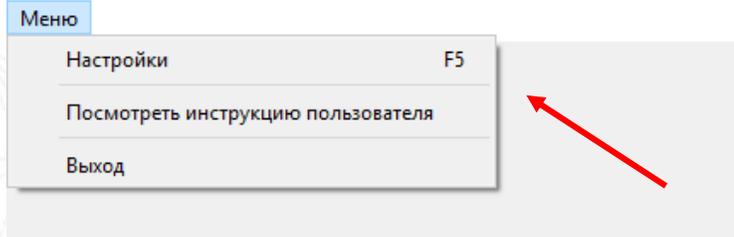


Откройте программу Neurochat (по умолчанию ярлык находится на рабочем столе). В программе зайдите в меню (F5) >> Настройки.

**Необходимо ввести и настроить:**

- Логин/пароль (вкладка «Основное»)
- Язык (вкладка «Язык»)
- Настройки клавиатуры (вкладка «Клавиатура», настраивается непосредственно перед работой)


При появлении новой версии ПО, программа предложит его установить автоматически.

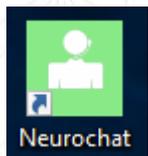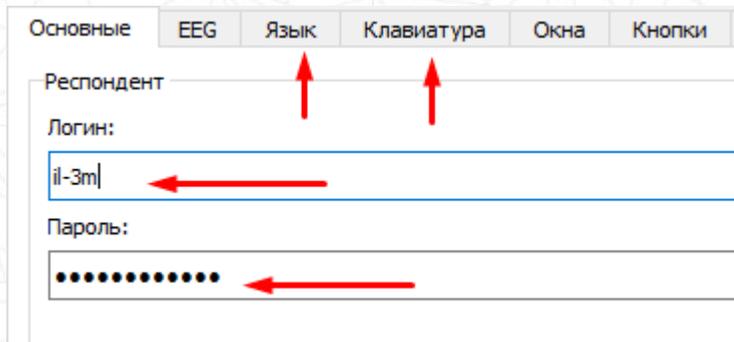

# Подключение нейрогарнитуры, проверка соединения

## Первый запуск программы, проверка подключения

- При подключении нейрогарнитуры к компьютеру через Wi-Fi в списке беспроводных сетей найдите сеть «EEG\_8...» и введите пароль «neurochat». Должна появиться надпись «Нет подключения к Интернет, защищено».
- Запустите программу Neurochat. Проверьте подключение к гарнитуре на главном экране: должен отображаться уровень заряда элемента питания и надпись «Подключено».
- В программе Neurochat проверьте подключение к серверу: Настройки – Классификатор – Доступные классификаторы. Должна быть надпись «Ping» с цифрой.

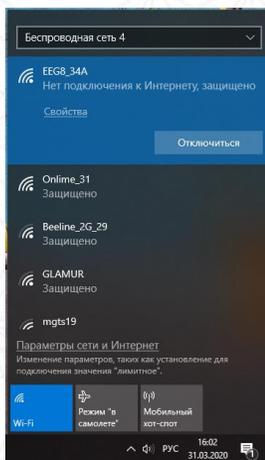

Подключено!  
Необходимо поправить следующие электроды: P3 P07 O1 Pz Oz O2 P08 P4 REF GND

Старт

Доступные классификаторы:

```
sing (http://classifier2.neurochat.ru/) Ping: no info
mos (http://classifier.neurochat.ru/) Ping: 67 (min: 57 max: 78)
3 (http://classifier3.neurochat.ru/) Ping: no info
```